



**ALPHA BOND LIGHT**  
Адгезив стоматологический/Лазировщик

**ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**Состав:**

**ALPHA BOND LIGHT** содержит: бис-ГМА, тегдма, 2,6 ДИ, уретан, бензил диметил кетал, канфорхинон, квантакур ЕХА.

**Показания к применению:**

**ALPHA BOND LIGHT** светоотверждаемый адгезив который проникает в микропоры протравленной эмали и химически связывается с композитными материалами, а также микромеханически. Он обеспечивает адгезию светоотверждаемых композитных реставраций позволяет производить наилучшие финишные работы. Он уменьшает микроинфильтрацию и тем самым предотвращает деколорацию.

**Форма выпуска:**

Коробка с 1 флаконом (5 мл) **ALPHA BOND LIGHT**

**Условия хранения:**

**ALPHA BOND LIGHT** следует хранить при температуре от 15°C до 30°C. Избегать перегрева. Хранить флаконы плотно закрытыми. При соблюдении этих условий продукт может использоваться в течение 2 лет с даты выработки. Не использовать продукт после окончания срока годности.

**Инструкции по применению:**

Во время процедуры рекомендуется использовать перчатки.

**Использование в качестве бондинга:**

Обработайте эмаль в районе подготавливаемой полости с помощью **ALPHA ACID** или **ALPHA ETCH**. Промойте полость водой полностью удалив остатки фосфорной кислоты после протравки, просушите. Воздушная струя должна быть чистой, свободной от любой масляной субстанции. С помощью чистой кисточки нанесите тонкий слой **ALPHA BOND LIGHT** на протравленную эмаль и фотополимеризуйте 20 секунд. Далее нанесите светополимеризуемый композит.

**Использование при «ребондинге» («постбондинге»):**

После окончательной обработки и полирования реставрации нанесите протравочный гель **ALPHA ACID** или **ALPHA ETCH** на поверхность композита, используя соответствующую изоляцию, промойте и высушите. Нанесите **ALPHA BOND** и полимеризуйте в течении 20 секунд.

Не использовать повторно отходы продукта. Их следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны.

**Меры предосторожности:**

Не используйте **ALPHA BOND LIGHT** у пациентов имеющих случаи аллергических реакций на компоненты, содержащие акрилат. В случае возникновения аллергической реакции Вы должны немедленно прекратить использование продукта и порекомендовать пациенту обратиться к врачу-аллергологу. Избегать контакта со слизистой оболочкой рта или кожей. В случае контакта, немедленно удалить материал смоченной водой гидрофильной ватой и тщательно промыть водой. Избегать попадания в глаза; при случайном попадании немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Данный продукт должен использоваться только стоматологами и в целях, описанных в Инструкции по применению.

**Производитель:**

DFL Indústria e Comércio S.A.  
Estrada do Guerenguê, 2059 –  
Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия  
СЕР: 22713-002  
CNPJ:33.112.665/0001-46

**Ответственный фармацевт:**

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

[www.dfl.com.br](http://www.dfl.com.br)

Сделано в Бразилии

**Телефон в России 8 800 200 17 70**