

Инструкция к применению
стоматологического геля для травления

ALPHA ETCH Gel
Ортофосфорная кислота 37%

(Только для профессионального применения)

Состав

ALPHA ETCH Gel содержит:

Ортофосфорная кислота
Коллоидный диоксид кремния (Aerosil 200)
Метиленовый синий CI 52015 (1% раствор)
Глицерин дистиллированный
Деминерализованная вода

Показания к применению

ALPHA ETCH Gel применяют для тотального протравливания эмали или дентина с целью повышения механической ретенции прямых и непрямых реставраций. ALPHA ETCH рекомендовано использовать в качестве профилактического средства во время обработки фиссур перед их запечатыванием.

Способ применения

Рекомендовано использование перчаток во время применения средства.

Примечание. Пациенту следует сообщить о том, что существует риск возникновения чувствительности во время лечения. Чувствительность можно уменьшить, используя соответствующее изолирующее средство (раббердам) и средство для защиты пульпы.

Этапы работы:

1. Очистите поверхность, используя абразивные средства и воду. Не используйте материалы, содержащие масла, фтор или глицерин.
2. Тщательно промойте, высушите обезжиренным воздухом и изолируйте зуб для проведения протравки.
3. Установите наконечник на шприц и нанесите необходимое количество средства ALPHA ETCH прямо на обрабатываемую эмаль или дентин.
4. Оставьте на 30 – 40 секунд для эмали и 15 – 20 секунд для дентина.
5. Хорошо промойте участок зуба на протяжении 20 секунд.
6. Высушите обезжиренным воздухом.

Примечание. Молочные зубы должны обрабатываться в течение 1 минуты. Протравленная поверхность должна быть непрозрачной и беловатой. В противном случае протравите участок еще раз. Фторированная эмаль может отбеливаться немного дольше. На поверхность ничего не должно попадать. Например, в случае попадания слюны на поверхность зуба следует повторить всю процедуру травления.

Меры предосторожности

Средство содержит ортофосфорную кислоту, которая может вызывать ожоги. Следите за тем, чтобы средство не попало на мягкие ткани или на кожу. Если все-таки это случилось, немедленно вытрите остатки средства влажной гидрофильной ватой и промойте тщательно водой. Избегайте контакта с глазами; в случае попадания средства немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. Продукт должен использоваться только стоматологом и в случаях, которые указаны в инструкции. Остатки продукта не должны повторно использоваться. Утилизировать остатки следует согласно действующим в стране требованиям и нормам.

Срок годности и условия хранения

Средство ALPHA ETCH Gel следует хранить при температуре 15⁰- 30⁰С. Не перегревать. При таких условиях хранения материал годен 2 года.

Форма выпуска

Упаковка: 3 шприца ALPHA ETCH Gel 3 г (2,5 мл).

Производитель

DFL Indústria e Comércio S.A.

Estrada do Gueranguê, 2059 –

Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия

CNPJ 22713-002

CNPJ 33.112.6650001-46

Ответственный фармацевт

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

www.dfl.com.br

Сделано в Бразилии