



Инструкция к применению
однокомпонентной адгезивной системы

NATURAL BOND DE

(Только для профессионального использования)

Состав

NATURAL BOND DE содержит светоотверждаемый однокомпонентный адгезив для эмали и дентина (DE).

NATURAL BOND DE содержит:

Пиромелитовый диангидрид глицерил-диметакрилата (PMGDM)

Гидроксиэтилметакрилат (HEMA)

Калиевый гексафторантимониат (PHFA)

Камфорохинон

Этил-4-диметиламинобензоат (4-EDAMB)

Бутилгидрокситолуол

Компоненты, растворимые в этаноле

Материал NATURAL BOND DE создан таким образом, чтобы обеспечивать надежную адгезию как прямых, так и не прямых реставраций. Также средство является совместимым со всеми видами стоматологических реставрационных материалов, а именно: с различными кондиционерами для дентина и эмали, композитами, компонентами реставрационных материалов и стеклоиономерными цементами.

Содержит фтор.

Показания к применению

NATURAL BOND DE предназначен для адгезии композитного материала или компомера с эмалью или дентином при прямых и не прямых реставрациях.

Прямые реставрации с использованием композита и светоотверждаемого компомера.

Используется в качестве адгезивной системы при реставрации керамических конструкций, изготовлении прямых и не прямых виниров, при фиксации вкладок и коронок.

Способ применения

Рекомендовано использовать перчатки во время применения.

Внимание! Пациенту следует сообщить о том, что существует риск возникновения чувствительности во время лечения. Следует обеспечить полную изоляцию зуба насколько это возможно. Если лечение будет проводиться в непосредственной близости от пульпы, следует использовать материал на основе гидроксида кальция и/или стеклоиономерный цемент.

Процедура бондинга композита с дентином/эмалью (NATURAL BOND DE):

1. Изолируйте, очистите и отпрепарируйте зуб под реставрацию.
2. Протравите дентин в течение 30 секунд, эмаль в течение 15 секунд, используя средство ALPHA ETCH.
3. Промойте струей воды.
4. Удалите остатки воды с помощью струи воздуха, избегая полного высушивания дентина. Влага должна визуализироваться на всей поверхности (блестящий дентин), но не накапливаться на дне. Если вода все же накопилась, ее следует промокнуть бумажными штифтами или удалить с помощью щеточки. Также следует избегать попадания слюны на рабочую поверхность препарированного зуба.



5. Две капли средства NATURAL BOND DE капните в специальный сосуд для смешивания. Нанесите первый слой, втирайте его в течение 5 секунд, подождите еще 20 секунд и слегка высушите струей воздуха на протяжении 5 - 10 секунд, чтобы растворитель испарился. Далее нанесите второй слой и подождите еще 20 секунд. Избегайте истончения слоев, которое может быть вызвано избыточным давлением воздушной струи.
6. Фотополимеризуйте светом 20 секунд. Поверхность должна блестеть. Если такого эффекта не наблюдается, повторите процедуру еще раз.
7. Продолжайте работать, постепенно нанося композит в соответствии с инструкцией к применению.

Меры предосторожности

Не используйте средство NATURAL BOND DE для лечения пациентов, организм которых проявлял раньше аллергическую реакцию на композиты, содержащие акрилаты. В случае возникновения аллергической реакции следует немедленно остановить пломбирование и посоветовать пациенту обратиться к врачу. Избегайте контакта материала с мягкими тканями и кожей. В случае контакта следует немедленно удалить материал гидрофильной ватой, смоченной в воде, а затем пораженное место тщательно промыть водой. Избегать контакта с глазами. В случае случайного контакта промойте немедленно глаза водой и обратитесь к врачу. Продукт может быть использован только стоматологами и в случаях, указанных в инструкции.

Срок годности и условия хранения

NATURAL BOND DE следует хранить подальше от источников тепла (избегать температуры выше 40⁰С). Не перегревать. После использования хранить флакон плотно закрытым в сухом месте. Защищать от света. При таких условиях хранения срок годности продукта составляет 2 года. Не использовать продукт после окончания срока годности.

Форма выпуска

Упаковка: 1 флакон (4 мл) NATURAL BOND DE

Производитель

DFL Indústria e Comércio S.A.
Estrada do Guerenguê, 2059 –
Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия
CEP 22713-002
CNPJ33.112.6650001-46
Ответственный фармацевт
Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897
www.dfl.com.br
Сделано в Бразилии