

Инструкция к применению
Светоотверждаемого наноуполненного микрогибридного композитного материала

NATURAL LOOK

(Только для профессионального применения)

NATURAL LOOK – это универсальный высокоэстетический светоотверждаемый микрогибридный композит с наночастицами, который обладает прекрасной консистенцией и рентгеноконтрастностью. NATURAL LOOK производится в условиях строгого контроля качества, что обеспечивает прекрасные эстетические и функциональные результаты использования материала в стоматологической практике.

Состав

NATURAL LOOK содержит:

Диглицидиловый метакрилат бисфенола А
Диэтоксиметакрилат бисфенола А
Триэтиленгликоль диметакрилат
Бариевое стекло атомизированное
Аморфная двуокись кремния гидрофобная
Камфорхинон

Показания к применению

NATURAL LOOK показан для:

- реставраций полостей I, II, III, IV и V классов;
- прямых реставраций;
- закрытия трем и диастем;
- шинирования.

Технические данные в соответствии с ISO 4049:

	Дентин	Эмаль
Средний размер частиц	0,5 мкм	0,5 мкм
Диапазон размеров частиц	0,04 – 2,8 мкм	
Объемная концентрация неорганических наполнителей в процентах	59%	58,5%
Массовая концентрация неорганических наполнителей в процентах	78%	77%

Способ применения

1. Удалите предыдущую пломбу и /или коронку. Сколите края эмали, если это необходимо.
2. Очистите подлежащий лечению зуб, а также соседние зубы, используя специальную пасту, не содержащую фтор.
3. Выберите оттенок материала, который естественно и гармонично выглядит при дневном свете.
4. Изолируйте зуб, используя раббердам.
5. В случае необходимости твердые ткани зуба, которые находятся максимально близко к пульпе, покройте специальной лечебной прокладкой на основе гидроокиси кальция, или изолируйте слоем стеклоиономера VITRO FIL LC.
6. Протравите поверхность зуба, используя ALPA ETCH. При этом всегда придерживайтесь соответствующих инструкций относительно использования.

7. Наденьте в случае необходимости прозрачную матрицу для контурных пломб. Зафиксируйте ее проксимально, используя специальные интердентальные клинья.
8. Используйте адгезивную систему NATURAL BOND DE, следуя инструкции.
9. Выделите порцию материала NATURAL LOOK прямо на палет для смешивания, возьмите небольшое количество и вносите в сформированную полость слоями толщиной до 2 мм.
10. Полимеризуйте каждый слой материала светом в течение 20 секунд, окончательную полимеризацию проводите в течение 40 секунд.
11. Финишную обработку проводите в три этапа:
 - а) финишная обработка с помощью алмазных боров;
 - б) полировка поверхности силиконовыми дисками;
 - в) для получения окончательного эстетического вида используйте финишные головки и полировочные пасты для окончательной полировки.

Меры предосторожности

Материал прошел биологическое испытание на токсичность и обеспечение отсутствия чувствительности зуба.

Не применять пациентам, организм которых проявляет аллергическую реакцию на ингредиенты композиционного материала или амины.

Срок годности и условия хранения

Материал NATURAL LOOK следует хранить при температуре от 2⁰С до 30⁰С, при этом необходимо избегать попадания на материал прямых солнечных лучей и перегревания.

Материал NATURAL LOOK пригоден к использованию в течение 3 лет с даты производства. Остатки материала не использовать повторно. Утилизация должна осуществляться согласно существующим в стране нормам и требованиям.

Форма выпуска

Упаковка: 1 шприц NATURAL LOOK 4 г.

Материал NATURAL LOOK выпускается в следующих цветах:

Эмаль А1; А2; А3; А3, 5; А4; В2; В3; С2; С3; С4; D3;

Эмаль "отбеленные зубы" (CL);

Дентин А2; А3, 5; В2; С2;

Оттенок "режущий край" (Incisal).

Набор: 7 шприцев NATURAL LOOK по 4 г,

1 флакон NATURAL BOND DE 4 мл,

1 шприц ALPHA ETCH Gel 2,5 мл.

Набор: 4 шприца NATURAL LOOK по 4 г,

1 флакон NATURAL BOND DE 4 мл,

1 шприц ALPHA ETCH Gel 2,5 мл.

Производитель

DFL Indústria e Comércio S.A.

Estrada do Guerenguê, 2059 –

Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия

CEP 22713-002

CNPJ33.112.6650001-46

Ответственный фармацевт

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

www.dfl.com.br

Сделано в Бразилии

