



Инструкция к применению  
кондиционера для дентина

**VITRO CONDICIONADOR**  
**Полиакриловая кислота 11,5 %**  
(Только для профессионального применения)

**Состав**

**VITRO CONDICIONADOR** содержит:

Полиакриловую кислоту  
Глицерин  
Диоксид коллоидного кремнезема  
Метиленовый синий CI 52015  
Деионизированную воду

**VITRO CONDICIONADOR** – это 11,5% раствор полиакриловой кислоты на водной основе, который удаляет остатки дентина с поверхности полости после препарирования.

**Показания к применению**

**VITRO CONDICIONADOR** показан к применению для удаления «смазанного слоя», который появляется при препарировании дентина. Обработка дентина **VITRO CONDICIONADOR** намного повышает адгезивные свойства стеклоиономерных цементов посредством связывания с ионами кальция и фосфатов, присутствующих в дентине.

**Способ применения**

Во время процедуры рекомендуется использовать перчатки и защитные очки. Перед использованием флакон встряхнуть.

Перед проведением процедуры проинформируйте пациента о вероятности возникновения чувствительности в месте обработки. Чувствительность можно минимизировать, используя адекватную изоляцию (раббердам).

Тщательно промойте водой сформированную полость и высушите струей воздуха. Нанесите **VITRO CONDICIONADOR** на зуб, используя ватный тампон или одноразовую щетку, и втирайте в течение 10 секунд. Синий цвет раствора обеспечит отличный обзор обрабатываемой зоны. Удалите **VITRO CONDICIONADOR**, промывая зуб водой в течение не менее 30 секунд. Аккуратно высушите зуб струей воздуха, избегая пересушивания дентина. Нанесите стеклоиономерный цемент.

**Внимание!**

**VITRO CONDICIONADOR** не следует использовать перед фиксацией мостов и коронок стеклоиономером. В этих случаях «смазанный слой» образует защитный слой дентина, который не следует удалять. При данных процедурах будет достаточно механической ретенции. Не использовать повторно отходы продукта. Их следует утилизировать в соответствии с действующими в стране нормами и требованиями.

**Меры предосторожности**

Избегать контакта с мягкими тканями или кожей. В случае контакта, немедленно удалить материал влажной гидрофильной ватой и тщательно промыть водой. Избегать попадания в глаза. При случайном попадании немедленно промыть глаза водой и обратиться к врачу. Данный продукт должен использоваться только стоматологами и по назначению, указанному в инструкции.

**Условия хранения**

VITRO CONDICIONADOR следует хранить при температуре от 15°C до 30°C. Избегать перегрева. Хранить флаконы плотно закрытыми. При соблюдении этих условий срок годности продукта составляет 2 года с даты производства. Не использовать продукт после окончания срока годности.

**Форма выпуска**

Упаковка: 1 флакон (10 мл) VITRO CONDICIONADOR.

**Производитель**

DFL Indústria e Comércio S.A.

Estrada do Guerenguê, 2059 –

Рио-де-Жанейро – штат Рио-де-Жанейро – Бразилия

CEP 22713-002

CNPJ33.112.6650001-46

Ответственный фармацевт

Доктор Эвалдо Р. де Оливьера CRF-RJ № 2897

[www.dfl.com.br](http://www.dfl.com.br)

Сделано в Бразилии